

Satisfyer

Gebrauchsanweisung zu Deinem Gleitmittel

WICHTIG! Bitte lies diese Anleitung vor der ersten Ingebrauchnahme des Produktes aufmerksam und vollständig durch und beachte insbesondere die Warn- und Sicherheitshinweise. Bewahre diese Anleitungsbroschüre auf, da sie wichtige Informationen zum sicheren Gebrauch sowie zu technischen und gesetzlichen Informationspflichten enthält, die auch zu einem späteren Zeitpunkt wichtig für Dich sein könnten.

Das Gleitmittel wird einfach auf das Körperteil oder das am erigierten Penis abgerollte Kondom getropft und dann vorsichtig mit den Fingern verteilt. Wasche deine Hände vorher gründlich, um hygienische Anwendung zu gewährleisten. Achte beim Verteilen darauf, dass du die Fingernägel nicht versehentlich in das Kondom drückst. Das Gleitmittel ist auf Silikonbasis, was es besonders sparsam im Gebrauch und langanhaltend macht. Es lässt sich nur mit warmem Wasser und einer milden Seife rückstandslos entfernen. Bitte verwende silikonbasierte Gleitmittel nicht mit Toys aus Materialien, die mit Silikon reagieren könnten, da es zu Schäden an den Materialien kommen kann.

Informationen zum Gleitmittel: Das öl- und fettfreie Gleitmittel ist ein Medizinprodukt, das für die Anwendung auf der Haut, im Intimbereich sowie mit allen Kondomen geeignet ist. Es erfüllt die strengen Anforderungen der europäischen „Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte“ sowie des deutschen „Medizinproduktegesetzes“. Dank der Verwendung ausgewählter Rohstoffe, kontrollierter Fertigungsprozesse und umfangreicher Prüfungen bietet es hohe Qualität. Es wurde auf Haut- und Schleimhautverträglichkeit getestet und seine Kondomverträglichkeit wurde nachgewiesen.

Sonstige Hinweise: Gleitmittel vermindern die Reibung und verbessern gleichzeitig die Gleitfähigkeit, weshalb ihre Verwendung beim Geschlechtsverkehr empfohlen wird. Dadurch können Schmerzen und leichten Verletzungen im empfindlichen Intimbereich vorgebeugt werden. Auch die Verwendung von Kondomen wird durch die reduzierte Reibung sicherer. Silikonbasierte Gleitmittel sollten niemals mit Lovetoys verwendet werden, da sich die Materialien untereinander negativ beeinflussen können.

Schwangerschaftsverhütung und Schutz vor Infektionen: Das Gleitmittel ist kein empfängnisverhütendes Mittel, enthält keine spermiziden Wirkstoffe und bietet keinen Infektionsschutz.

Bei Kinderwunsch: Gynäkologen empfehlen, Gleitmittel bei Kinderwunsch nur sparsam einzusetzen oder zur Sicherheit ganz darauf zu verzichten, da die Empfängnis erschwert werden könnte.

Informiere Dich in der Kennzeichnung des Produkts unter „Ingredients (INCI)“ über unverträgliche oder allergieauslösende Stoffe. Wenn Unverträglichkeiten auftreten, entferne das Produkt bitte wie oben beschrieben und konsultiere gegebenenfalls einen Arzt.

Spezifikationen zu 0830325F

Inhalt (in ml): 150

Ingredients (INCI): Dimethicone, Cyclopentasiloxane, Dimethiconol

Sollten bei der Verwendung des Produkts Probleme auftauchen, wende Dich bitte an unseren Kundensupport, der Dich bei Deinen Schwierigkeiten gerne unterstützen wird. Kunden in Deutschland nutzen dafür die E-Mail Adresse info@eis.de, Kunden in Österreich die E-Mail Adresse info@eis.at.

CE 0197

Nach Anbruch mindestens 3 Monate haltbar. Beachte das Mindesthaltbarkeitsdatum auf der Flasche.

Hersteller:

Livondo GmbH

Kurt-Schumacher-Str. 22

53113 Bonn – Germany

info@livondo.com

Tel. +49 228 – 289 255-0