

venize

Gebrauchsanweisung zu Deinem Mama-Gurt

WICHTIG! Bitte lies diese Anleitung vor der ersten Ingebrauchnahme des Produktes aufmerksam und vollständig durch und beachte insbesondere die Warn- und Sicherheitshinweise. Bewahre diese Anleitungsbroschüre auf, da sie wichtige Informationen zum sicheren Gebrauch sowie zu technischen und gesetzlichen Informationspflichten enthält, die auch zu einem späteren Zeitpunkt wichtig für Dich sein könnten.

Anwendung: Der Mama Gurt ist Dein perfekter Begleiter während der Schwangerschaft und nach der Geburt. In der Schwangerschaft stützt er Deinen Bauch, entlastet den unteren Rücken und hilft Dir, eine bessere Haltung einzunehmen. Dadurch können Rückenschmerzen reduziert werden, und Du fühlst Dich insgesamt wohler. Nach der Geburt unterstützt der Gurt die Rückbildung, stabilisiert Bauch und Rücken und gibt Deinem Körper die nötige Stütze.

So legst du den Gurt richtig an: Wähle einfach den passenden Gurt (für vor oder nach der Geburt), lege ihn um Deinen Bauch und fixiere ihn mit dem Klettverschluss. Achte darauf, dass er gut sitzt – stabil, aber nicht zu eng. Du kannst den Gurt tagsüber tragen, solltest ihn aber beim Schlafen ablegen.

Spezifikationen zu Artikelnummer es70644

Durchmesser max (in cm): 130

Material: 85% Baumwolle, 15% Polyurethan

Reinigungshinweis: Dieses Accessoire sollte nur mit der Hand gewaschen werden. Nutze hierfür eine milde Seife oder spezielles Waschmittel für Handwäsche. Bitte nutze keinen Wäschetrockner zum Trocknen!

Bei Fehlern oder Bedienungsschwierigkeiten wende Dich bitte an unseren Kundensupport, der Dich bei Deinen Schwierigkeiten gerne unterstützen wird. Unsere Kunden nutzen dafür die E-Mail Adresse hallo@venize.de.

Warn- und Sicherheitshinweise:

Nicht zu eng anlegen: Der Gurt sollte nicht zu fest sitzen, um die Blutzirkulation nicht zu beeinträchtigen. Achte darauf, dass er bequem und nicht einschränkend ist.

Nur während des Tages tragen: Trage den Gurt tagsüber, jedoch nicht über längere Zeiträume oder während des Schlafens. Eine zu lange Tragedauer kann unangenehm werden oder den Körper unnötig belasten.

Bei Beschwerden sofort abnehmen: Wenn du Schmerzen, Taubheitsgefühle oder andere Beschwerden beim Tragen des Gurtes verspürst, nimm den Gurt sofort ab und konsultiere einen Arzt oder eine Hebamme.

Keine Selbstdiagnose: Der Gurt dient zur Unterstützung und Entlastung, ersetzt jedoch keine medizinische Behandlung. Bei gesundheitlichen Problemen oder Unsicherheiten solltest du immer deinen Arzt oder deine Hebamme zurate ziehen.

Nicht für schwere medizinische Erkrankungen geeignet: Der Gurt ist nicht für Frauen mit schweren medizinischen Erkrankungen oder Komplikationen während der Schwangerschaft oder nach der Geburt geeignet. Bitte wende dich in diesen Fällen an deinen Arzt.

Sauberkeit und Pflege: Achte darauf, den Gurt regelmäßig zu reinigen, aber befolge die Pflegehinweise des Herstellers. Vermeide es, den Gurt zu waschen oder zu reinigen, wenn er beschädigt ist.

Kinder fernhalten: Der Gurt ist kein Spielzeug. Halte ihn außerhalb der Reichweite von Kindern, um ein versehentliches Verschlucken von Kleinteilen zu vermeiden.

Hinweis zur Garantie: Wir bieten Dir 10 Jahre Garantie auf unsere Artikel! Sollte innerhalb von 10 Jahren nach Deinem Einkauf im Eifer des Gefechts doch einmal etwas kaputtgehen, kannst Du die defekte Ware jederzeit an uns zurücksenden und wir erstatten Dir den vollen Kaufpreis zurück. Ausgeschlossen von der Garantiezeit sind Kondome, Gleitmittel, Massageöl, Aphrodisiaka und Aktionsprodukte. Durch diese Garantie werden Deine gesetzlichen Gewährleistungsrechte nicht eingeschränkt. Zudem geben wir Dir nach Ablauf des gesetzlich vorgeschriebenen 14-tägigen Widerrufsrechts ein zusätzliches 365-Tage Geld-Zurück-Versprechen auf alle Artikel!

venize

Die Waren werden bitte unter Bezugnahme auf die Garantie an die folgende Adresse gesendet:

B+S GmbH Logistik und Dienstleistungen
Terminal 2 Retourenannahme
Fuggerstraße 17
33689 Bielefeld

Mehr dazu findest Du unter <https://www.venize.de/365-tage-geld-zurueck-garantie>

Venize Trading GmbH
Dortmunder Str. 34, 28199 Bremen
E-Mail für unsere Kunden: hallo@venize.de